

ÖGON- OCH BRÄNNSKADEDUSCH

Dokument Ogondusch.doc

Flik 10



Art nr 18-7026-02

Enkelt, snabbt och med lång spoltid

Ögonduschen har en unik konstruktion med en vätskebehållare och ett separat spraymunstycke anslutet med en slang.

Spraymunstycket är dubbelverkande. Strålen är mjuk och tillräckligt vid för att täcka in båda ögonen samtidigt.

I och med att duschen kan spruta i alla riktningar kan ögonspolning sker även om den skadade tittar nedåt. En fördel som gör behandlingen bekvämare och som underlättar transport till sjukhus.

Behållaren innehåller steril koksaltlösning (0,9%). En påse på 1 liter räcker i ca 20 minuter. En sats med två påsar räcker i 40 till 50 minuter.

Påsarna är monterade i ett plastskåp som skyddar mot damm och nedsmutsning. Locket är transparent så att man kan kontrollera att utrustningen finns på plats och inte är slut.

Skåpet fästs på vägg i en ram. Ramen skruvas fast och skåpet fästs med ett snäppfäste i ramen vilket gör att det med ett enkelt handgrepp kan tas med till skadeplatsen eller vid transport till läkare.



Bilden visar spraymunstyckets sprutbild med en mjuk och bred stråle med optimal droppstorlek.

Det är mycket viktigt att snabbt påbörja sköljning om man har fått ett frätande ämne i ögat. Spolning skall påbörjas inom ett par sekunder och fortgå i minst 15 minuter och därefter under transporten till sjukhus.

Ögonduschen är mycket enkel att använda. Den har lång spruttid och kan även tas med vid transport till läkare. Utformningen gör den väl anpassad till de ändrade kraven i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om första hjälpen. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2000 och de betonar än mer:

- vikten av snabb och långvarig spolning
- att vattnet skall vara tempererat vid spolning mer än 15 minuter
- fast utrustning bör kompletteras med mobil för användning under transport till sjukhus

Många varianter

Medi Box – med dubbla sprayflaskor

Standardutförande med dubbla sprayflaskor för 40 – 50 minuters spruttid. Plastlåda med transparent lock och väggfäste som gör att lådan enkelt kan lossas från vägg och tas med till skadeplats eller vid transport till läkare.

Medi Case – med första hjälpen

Utförande lika Medi Box men försedd med första hjälpen utrustning i locket.



Art nr 18-7026-12

Medi Ladd – med skyddsutrustning för laddstation

Försedd med en spraybehållare samt skyddsutrustning för batterihantering – skyddsglasögon, skyddshandskar, skyddsförkläde samt väggskylt.

Medi Tube – Enkelflaska för mobil användning

En sprayflaska förpackad i en skyddande plasttub med lock. Tuben kan enkelt tas med vid mobilt arbete eller vid transport till sjukhus. Spruttid 20 – 25 minuter.

Många fördelar med ögonspray

Jämfört med konventionella plastflaskor för ögonsköljning har spraypumpen många fördelar:

- Mångsidig – kan användas för ögonskölj, sårvård och brännskada.
- Enkel att använda och kan hanteras utan föregående instruktion. Kan även demonstreras för nyanställd eller övrig personal i samband med utbildning.
- Spolvätskan är höggradigt ren och har samma pH-värde och salthalt som tårar.
- Enkel att ta med under transport till läkare.
- Mycket vatten – dubbelverkande spraypump ger rikligt med vatten.
- Spraystrålen är mjuk och ger en behaglig genomsköljning.
- Sprutbilden ger en fylld kon med tillräckligt spridning för att täcka in båda ögonen samtidigt.
- Lång spruttid – minst 20 minuter.
- Naturlig arbetsställning. Istället för att titta uppåt kan den skadade sitta på en stol och titta nedåt t.ex i bilsäte på väg till sjukhus.
- Billig att använda – begränsad förbrukning, ingen flaska bryts som måste bytas, ny påse är billig.

Medi Tube avsedd för mobil användning



Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 innehåller regler och krav om ögonspolning. Kungörelsen uppdaterades den 1 juli 2000 med bland annat mer detaljerade och utökade krav gällande ögonspolning.

Utrustning för ögonspolning skall finnas där det finns risk att ämnen kan skada ögat. Om ögonspolning krävs i 15 minuter eller mer skall spolvätska vara tempererad.

Spolanordningens funktion skall kontrolleras regelbundet. Rutiner för utbyte av engångsflaskor skall finnas.

Vid stänk av frätande ämnen skall spolning pågå i minst 15 minuter och under transporten till sjukhus. Fast spol-anordning bör därför kompletteras med mobil utrustning t.ex en ögonduch. Man bör ha påsar så att de räcker för en spolning under hela transporttiden.

Anordning för ögonspolning skall finnas i omedelbar närhet till arbetsplatsen. Man skall helst nå utrustningen inom ett par sekunder.

Art nr 18-7026-30



Medi Ladd – avsedd för laddplats för truckar

Tekniska data

Variant	Medi Box	Medi Case	Medi Ladd	Medi Tube
Spolvätska		2 x 1 liter		1 x 1 liter
Spoltid		40-50 minuter		ca 20 minuter
Mått		Höjd 400, bredd 270, djup 130 mm		Höjd 280, ø 115 mm
Försedd med	Ögon- och brännskadedusch	1 st ögon- och brännskadedusch 3 st litet förband / blodstoppare 1 st stort förband / blodstoppare 1 st skyddspaket handske, savett, desinfektion och andningsmask 1 st sax 1 st plåsterautomat med 45 st plastplåster, 40 st textiplåster	Skyddsglasögon Skyddshandskar Skyddsförkläde Väggskylt, 2 st	Ögon- och brännskadedusch
Vikt	2,6 kg	3,5 kg	2,5 kg	1,2 kg
Artikelnummer	18-7026-02	18-7026-12	18-7026-30	18-7026-00